

## Symbole des Menüs | Beschreibung

	Ladezustand interner Akku
	Ladezustand Klick-Akku
	Heimmodus aktiviert
	Befeuchter bzw. Schlauchheizung angeschlossen
	SpO2-Sensor angeschlossen
	FiO2-Sensor angeschlossen
	EtcCO2-Sensor angeschlossen
	PtcCO2-Sensor angeschlossen
	Effort-Gurte angeschlossen
	Mehrere Seiten
	Mehrfachinhalt verfügbar

## Austausch der Patientenluft-Einlassfilter

Die beiden Filter befinden sich in der Filterkassette an der Seite des Beatmungsgerätes.

### Einwegfilter (weiß)

Mindestens alle 4 Wochen austauschen. Bei hoher Luftverschmutzung oder pollenreicher Umgebung häufiger.

### Washbare Filter (grau)

Bei Bedarf auswaschen. Einmal jährlich austauschen.

### Stellen Sie sicher, dass der Kühlluft Ein-/Auslass nicht blockiert werden kann

Der auswaschbare Kühlluft-Einlassfilter befindet sich am Beatmungsgerät unten links.






## Verwendung von Sauerstoff



- **O2 muss abgeschaltet werden, wenn das Vivo 45 | 45 LS nicht im Betriebsmodus ist!**
- **Es wird empfohlen die Sauerstoffkonzentration zu überwachen.**
- **Die Sauerstoffzufuhr darf 15 l/min nicht überschreiten und nicht angefeuchtet sein.**

1. Befestigen Sie den Sauerstoffschlauch am Anschluss.
2. Schließen Sie den Sauerstoffschlauch an. Wenn der Schlauch ordnungsgemäß angebracht wird, ist ein Klicken zu hören.

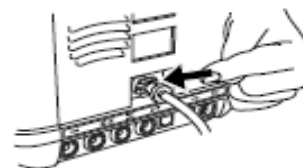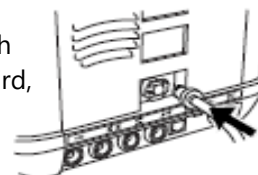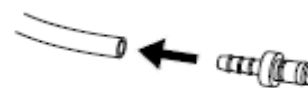


### Trennen:

1. Schalten Sie die Sauerstoffquelle ab.
2. Lösen Sie die Verriegelung, um den Sauerstoffschlauch zu trennen.
3. Nehmen Sie den Schlauch ab.

### Steck-Anschlüsse

Stellen Sie sicher, dass die Markierung am Stecker nach oben weist.

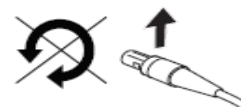

Ziehen Sie nicht am Kabel sondern am Stecker, um den Kontakt zu lösen.



**VIVO45** by Breas **VIVO45 LS** by Breas

## Kurzanleitung

Doc MAR-



Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisungen für das Vivo 45 bzw. Vivo 45 LS. Vollständige Informationen entnehmen Sie bitte den Gebrauchsanweisungen.




**BREAS**

BREAS Medical GmbH  
Bahnhofstr. 26  
DE-82211 Herrsching  
+49 (0) 8152 37 210  
BreasGmbH@breas.com



## Einschalten


1. Stecken Sie den Netzstecker an der Rückseite der Vivo 45 | 45 LS und das Netzkabel an einer Steckdose an.
2. Drücken Sie die Start-/Stopp-Taste am oberen Bedienfeld.

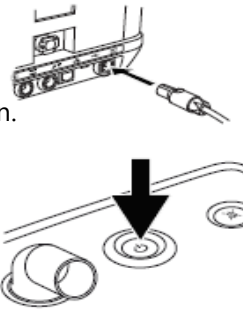

Bei Aufforderung zum Inbetriebnahme-Test, befolgen Sie bitte die Anweisungen auf dem Display.


## Starten der Therapie

1. Halten Sie die Start-/Stopp-Taste am oberen Bedienfeld gedrückt, um die Therapie zu beginnen.
2. Lassen Sie die Start-/Stopp-Taste wieder los, sobald die Fortschrittsanzeige gefüllt ist.

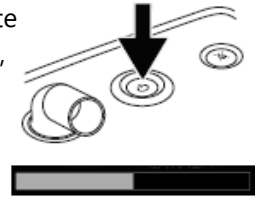

## Beenden der Therapie

1. Halten Sie die Start-/Stopp-Taste am oberen Bedienfeld gedrückt, um die Therapie zu beenden.
2. Lassen Sie die Start-/Stopp-Taste wieder los, sobald die Fortschrittsanzeige gefüllt ist.
3. Drücken Sie die Stummschaltung-Taste um die Therapie zu stoppen.

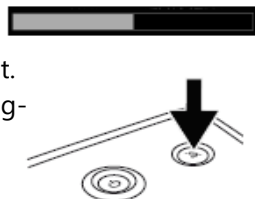


## Ausschalten

1. Drücken Sie kurz die Start-/Stopp-Taste am oberen Bedienfeld.
2. Bestätigen Sie mit der mittleren Taste unter dem Display die Anzeige „Aus“ im Auswahlfeld.

## i-Info Taste

Über die Info-Taste „i“ erhalten Sie Erläuterungen zu Einstellungen und Alarmen.

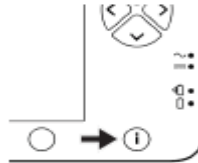


## Anschluss des Patientenschlauchsystems



Führen Sie immer einen Inbetriebnahme-Test durch, wenn das Patientenschlauchsystem ausgetauscht oder modifiziert wird.



Wenn beim Start keine entsprechende Aufforderung erfolgt, können Sie den Inbetriebnahme-Test über den Menü-Bereich *EXTRAS* starten.

1. Schließen Sie das Patientenschlauchsystem am Patientenluftauslass des Beatmungsgerätes an.
2. Bei einem Patientenschlauchsystem mit aktivem Ausatemventil schließen Sie den Steuerschlauch an der Rückseite des Beatmungsgerätes am Pilot-Line Adapter an (Vivo 45 LS).
3. Schließen Sie das andere Ende des Schlauchsystems an einen HME-Filter oder die Patientenschnittstelle an.

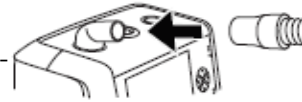

## Anschluss des Klick-Akkus (Zubehör)

1. Drücken Sie die Taste unter dem Griff um das Seitenteil freizugeben.
2. Entfernen Sie die Abdeckung.
3. Installieren Sie den Klick-Akku. Achten Sie darauf, dass die Verriegelung am Fachboden einrastet.
4. Setzen Sie die Abdeckung wieder ein. Beim Schließen muss ein Klickgeräusch zu hören sein.

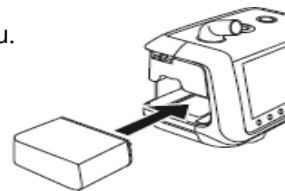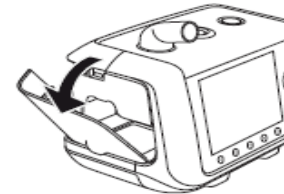

## Einsetzen der Befeuchterkammer

Schalten Sie den Luftbefeuchter nur ein, wenn die Befeuchterkammer gefüllt ist, sonst kann die Befeuchterelektronik beschädigt werden.

Falls ein Klick-Akku im Beatmungsgerät installiert wurde, muss er vor dem Einsetzen der Befeuchterkammer herausgenommen werden.

Führen Sie die Schritte der nachfolgenden Abbildungen durch, um die Befeuchterkammer in das Beatmungsgerät einzusetzen.

