

Konverter-Kit Gebrauchsanweisung:

Das WILAmед Konverter-Kit ermöglicht es Ihnen den Atemgasbefeuchter PMH5000 mit den AIRcon Atemschlauchsystemen von WILAmед zu verwenden. Für die richtige Anwendung führen Sie bitte folgende Schritte durch:

- 1.) Stecken Sie das grüne Kabel für die inspiratorische Heizung des PMH5000 mit dem grünen Adapter des Konverter-Kits zusammen und achten Sie auf die mechanische Kodierung (Einkerbung) der beiden Anschlüsse.
- 2.) Stecken Sie das graue Kabel des PMH5000 an den Adapter des kurzen schwarzen Verbindungskabels. Achten Sie dabei auf die mechanische Kodierung.
- 3.) Stecken Sie nun die Temperaturmesssonde an das andere Ende des schwarzen Verbindungskabels.

Hinweis: Um fehlerhafte Messergebnisse zu vermeiden muss das Verbindungskabel immer angeschlossen werden.

- 4.) **Optional:** Bei der Verwendung eines Doppelschlauchsystems, stecken Sie das weiße Kabel für die expiratorische Heizung des PMH5000 mit dem weißen Adapter des Konverter-Kits zusammen und achten Sie dabei auf die mechanische Kodierung (Einkerbung) der beiden Anschlüsse.

Nun können Sie mit Hilfe des Konverter-Kits alle beheizten AIRcon Atemschlauchsysteme an den Befeuchter PMH5000 anschließen.

Anschluss mit Einschlauchsystem:



Anschluss mit Doppelschlauchsystem:

